



Az okklúzió ellenőrzése két lépésben

A Bausch Progress 100® 100 mikronos artikulációs papír és az Arti-Fol® Metallic 12 mikronos artikulációs fólia kombinációjával jelentős előnyökre tehet szert, különösen arany vagy kerámia okklúziós felszíneken, amelyek vizsgálata egyébként nehézkes. Az első vizsgálatot kék artikulációs-papírral végezze. A foltok azonnal maguktól értetődően tájékoztatnak. A Transculase® bondozó anyag is átvitelre kerül, vékony bevonat formájában. A következő lépésben vékony fóliával (lehetőleg pirossal) vizsgáljon. A piros nagyon intenzív szín, és a kékkel kiváló kontrasztot ad. A fólia színezőképessége Transculase® bevonat által jelentősen javul. A módszer a legmegbízhatóbb eredményt nyújtja, a korai érintkezést nem lehet elnézni elégtelen jelölés miatt.

1



2



1. lépés:
Az okklúzió vizsgálata a kiváló színező-képességű Bausch PROGRESS 100® artikulációs papírral.

2. lépés:
Az okklúzió vizsgálata 12 mikronos Bausch Arti-Fol® Metallic fóliával.

A kék színű Bausch PROGRESS 100®-on a piros festék jól megtapad, valamint kontrasztos háttérként szerepel a precíz okkluzális festéshez.

Bausch PROGRESS 100® 100 mikronos, progresszív festőhatású artikulációs papír




Kiszerelés:	Szín:	Rendelési kód:	kód:
Műanyag adagoló	300 csik	kék	BK 51
Műanyag adagoló	300 csik	piros	BK 52
Műanyag patkó adagoló	50 levél	kék	BK 53
Műanyag patkó adagoló	50 levél	piros	BK 54
Doboz vágott csíkokkal	50 csik	kék	BK 57
Doboz vágott csíkokkal	50 csik	piros	BK 58

Bausch Arti-Fol® Metallic Shimstock fólia, 12 mikron



Szélesség:	Szín:	Rendelési kód:	kód:
20 m adagolóban	egyoldalú	22 mm fekete	BK 30
20 m adagolóban	egyoldalú	22 mm piros	BK 31
20 m adagolóban	egyoldalú	22 mm zöld	BK 32
20 m adagolóban	egyoldalú	22 mm kék	BK 33
100 lap (8x60mm)	egyoldalú	8 mm piros	BK 35
100 lap (8x60mm)	bevonat nélküli	8 mm -	BK 38
20 m adagolóban	bevonat nélküli	16 mm -	BK 39
20 m	egyoldalú	75 mm fekete	BK 730
20 m	egyoldalú	75 mm piros	BK 731

Bausch artikulációs papírok

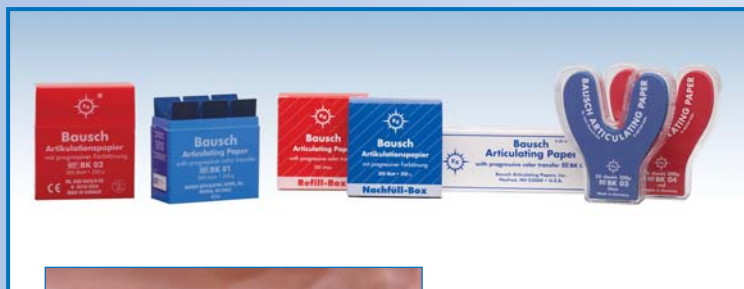

A Bausch 200 µm progresszív színező-képességű artikulációs papír az egyetlen papír, ami a teljes nyomáseloszlást eltérő árnyalatokkal festi meg:

Gyengébb harapás: világosabb szín
Erősebb harapás: sötétebb szín

Kiszerezés	Szín	Rendelési kód	Utántöltő kód
Műanyag adagoló	300 csík	kék	BK 01
Utántöltő	300 csík	kék	BK 1001
Műanyag adagoló	300 csík	piros	BK 02
Utántöltő	300 csík	piros	BK 1002
Műanyag patkó adagoló	50 levél	kék	BK 03
Műanyag patkó adagoló	50 levél	piros	BK 04
Füzet egyenes lapokkal	300 csík	kék	BK 05



A Bausch 40 µm mikro-vékony artikulációs papír különösen vékony és szakadásálló, mindkét oldalon folyékony festékbevonattal.

Kiszerezés	Szín	Rendelési kód	Utántöltő kód
Füzet egyenes	200 csík	kék	BK 09
Füzet egyenes	200 csík	piros	BK 10
Doboz lapokkal 10 x 7 cm	100 csík	kék	BK 11
Doboz lapokkal 10 x 7 cm	100 csík	piros	BK 12
Tekercs 16 mm széles	15 m	kék	BK 13
Tekercs 16 mm széles	15 m	piros	BK 14
Tekercs 22 mm széles	10 m	kék	BK 15
Tekercs 22 mm széles	10 m	piros	BK 16
Műanyag adagoló patkó	150 levél	kék	BK 17
Műanyag adagoló patkó	150 levél	piros	BK 18
Vágott csíkok	200 csík	kék	BK 61
Vágott csíkok	200 csík	piros	BK 62
Vágott csíkok	200 csík	kék/piros	BK 63



Akár a legkisebb korán érintkező pont is – legyen akár csak néhány mikronos nagyságrendű – funkciós zavart okozhat a páciensnél (leggyakrabban fájdalmas diszfunkciós szindrómát). A Bausch Arti-Fol® hidrofíli komponensei segítik a színátvitelt a nedves felületekre is.

Szélesség	Szín	Rend.	kód	Utántöltő
20m adagolóban egyoldalú	22 mm fekete		BK 20	BK1020
20m adagolóban egyoldalú	22 mm piros		BK 21	BK1021
20m adagolóban egyoldalú	22 mm zöld		BK 22	BK1022
20m adagolóban egyoldalú	22 mm kék		BK 23	BK1023
20m adagolóban kétoldalú	22 mm fekete		BK 24	BK1024
20m adagolóban kétoldalú	22 mm piros		BK 25	BK1025
20m adagolóban kétoldalú	22 mm zöld		BK 26	BK1026
20m adagolóban kétoldalú	22 mm kék		BK 27	BK1027
20m adagolóban kétoldalú	22 mm fekete/piros 12µ		BK 28	BK1028
20m adagolóban egyoldalú	22 mm fehér		BK 29	BK1029