

VOCO

Bifix SE

Használati utasítás

A Bifix SE egy univerzális, kettős kötésű, önsavazó, kompozit bázisú ragasztórendszer. Kerámia, fém és kompozit restaurációk Indirekt ragasztására, valamint csapok beragasztására. Használatakor nincs szükség további adhezív vagy kondicionáló anyagra.

A Bifix SE kettős funkciójú metakrilátot, savas metakrilátot és szerves töltőanyagot tartalmaz.

A töltőanyag tartalma 70% w/w. Háromféle színben létezik. U mint univerzális, T mint transzparens és WO mint fehér opák.

A QuickMix fecskendő automatikusan megkeveri az anyagot kizárva a hibákat és a levegőbuborékokat. 14-es, 15-s keverőcsőrökkel kapható és 1-es típusú intraorális véggel.

Alkalmazási területek:

- inlayk, onlayk, koronák, hidak ragasztásához kerámiából, kompozitból, fémből (zirkónium!)

- fém, kerámia és üvegszálcsapok ragasztásához
feldolgozási idő 2 perc – (23°C)

szájban feldolgozás behelyezés után 30 - 60 msp.

kötési idő 4 perc – (37°C)

Pulpa védelem:

A pulpa környékén alkalmazzunk kalcium-hydroxidot az irritáció elkerülése érdekében.

A használat menete:

1. Az ideiglenes anyag eltávolítása, kavitás preparáció

Távolítsuk el az ideiglenes anyagot és tisztítsuk meg a kavitást vagy a preparált csonkot fluorid mentes pasztával.

2. Preparáció

Ellenőrizzük az illesztési pontjait a végleges restaurációnak. Ha használtunk szilikont korábbiakban akkor a szilikon maradékokat távolítsuk el. Okklúzió ellenőrzés az üvegkerámiák esetében csak a végleges beragasztás után végezhető el a törés meggátolása érdekében. A próba után a fogfelszínről és a pótlásról távolítsuk el a felesleget. Készítsük el a pótlást a gyártó használati utasítása szerint majd szárítsuk meg. Megfelelően, kevés levegővel szárítsuk meg a fogfelszínét úgy hogy a dentin kissé nedves maradjon!

3. A pótlás behelyezése

Távolítsuk el a sapkát 90fokban elforgatva, majd helyezzük föl a 14-es vagy 15-s keverőcsőrt, melyeknek pontosan kell illeszkedni. Az óra állásával megegyezően 90fokban elforgatva kell zárni a csőr illeszkedését. Az anyag automatikusan megkeverődik a csőrben és azonnal applikálható. Az 1-es intraorális vég is feltehető a 15-s csőrre ha szükséges.

Helyezzük be a pótlást kis fölösleget hagyva.

4. A fölösleg eltávolítása

Először a nehezen hozzáférhető helyekről távolítsuk el. A kontakt pontokat és az interproximális területeket fogselyemmel tisztítsuk meg. A cementmaradványokat megfelelő eszközzel távolítsuk el még amikor zselé formában van jelen (kb. 60 - 90 msp-el a behelyezés után) vagy rövid polimerizáció után. Több fölösleg könnyebben eltávolítható. A polimerizáció alatt a pótlást ugyanabban a pozícióban kell tartani. Alternatívaként, a fölösleges ragasztócement eltávolítható habgolyócskával rögtön a pótlás behelyezése után. Hagyjunk egy kis fölösleget, majd

fedjük be glicerines zselével (levegő blokk) vagy lámpázzuk.

5. Lámpázás

A polimerizácót még egy lámpázással kontroláljuk. Az áttetsző pótlást 20 msp-ig lámpázzuk minden oldalon. Opák pótlásoknál 10 msp-ig minden oldalon.

Az önkötési idő a Bifix SE használata után 4 perc.

6. Befejezés

Gyémánttal eltávolítjuk a megkötött fölösleget. Az aproximális helyeken polírozó csíkot használva fejezzük be a munkát.

Gyökércsapok beragasztása:

1. Előkészítjük a gyökércsatornát. Előkészítjük a csapokat a gyártó használati utasítása szerint.
2. Fertőtlenítjük a csatornát, kiöblítjük kerülve a hidrogén peroxidot.
3. A QuickMix fecskendőről levesszük a sapkát, feltesszük a 15-s véget, elfordítjuk használati pozícióba, majd csatlakoztatjuk az intraorális csőrt.
4. Papírpoénnal kiszárítjuk a gyökércsatornát kicsit nedvesen hagyva a dentint.
5. Közvetlenül a csatornába helyezhetjük a Bifix SE-t. Lentulo-t ne használjunk. A gyökércsapot szintén kenjük be a Bifix SE-vel. Helyezzük be a csapot kicsit csavarva egyet rajta, ezzel hagyva némi felesleget. Távolítsuk el a durva felesleget, majd lámpázzuk meg a Bifix SE-et a csap irányában, hogy megkössön.

Elővigyázatossági szempontok:

A Bifix SE tartalmaz Bis-GMA-t, aliphaticot, sav methacrilatot, benzoil peroxidot, aminosavakat és BHT-t. Ne kezeljünk olyan pácienszt aki allergiás ezen felsoroltak valamelyikére.

Ne használjunk fenolos anyagot (olyan anyagot mely tartalmaz eugenolt vagy ideiglenes cementet) mert megakadályozhatják a Bifix SE mekötését. Eugenol mentes ideiglenes anyagot használjunk az ideiglenes ragasztáshoz.

Tárolás:

Tároljuk 4°C - 23°C fok között, hűtőben ajánlott. Ne használjuk ha már lejárt.

Használat előtt a szobahőmérsékletet érje el.

Készítményünket fogorvosi felhasználásra fejlesztettük ki. Az általunk szállított termék információit legjobb tudásunk szerint, minden kötelezettség nélkül szóban és/vagy írásban megadtuk. Az általunk adott információ és/vagy tanács nem mentesíti Önt annak a megvizsgálásától, hogy az általunk szállított anyag megfelel-e az Ön alkalmazási céljainak. Mivel készítményünk alkalmazását nem tudjuk ellenőrizni, a felhasználó felelős az alkalmazásért. Természetesen garantáljuk készítményünk minőségét a fennálló szabványok szerint megfelelően azon általános feltételeknek, melyeket az értékesítés és a szállítás során kikötöttünk.