

HU

Használati utasítás

Termékleírás:

A **Calcicur** röntgenárnyékot adó, vizes bázisú kalcium-hidroxid paszta, pH értéke >12.5.

Javallatok:

- indirekt pulpasapkázás mély kavitások esetén
- direkt pulpasapkázás és pulpotomia után
- fogvédelem a cementalábélelés során felszabaduló savakkal szemben
- a gyökércsatorna ideiglenes tömésére

Adagolási útmutató és a használata:

A tiszta és száraz üregben addig rétegezze a **Calcicur** pasztát, amíg el nem éri a kívánt rétegvastagságot. Minden réteget hagyjon megszáradni, vagy óvatosan szárítsa levegővel.

Ne használjon pasztát az üreg széleinél, vagy később távolítsa el az odatapadt felesleget. Ezután használja az alábélelő és tömőanyagot.

Gyökértöméshez először készítse elő és tisztítsa meg a gyökércsatornát (hidrogén-peroxid 3%, nátrium-hipoklorit oldat)

majd helyezze be a pasztát a gyökércsatornába a mellékelt applikációs kanüllel vagy egy Lentuloval. Ezután vigye a pasztát a gyökércsúcs felé a Lentulo segítségével.

Kerülje az apikális túltömést

és légbuborékok képződését. Helyezze be a tömőanyagot.

Röntgenfelvétel segítségével ellenőrizze a gyökércsatorna tömést.

Mintegy 6 - 8 hónap után végezze el újra a kezelést és újítsa meg a tömést.

A gyökércsatorna Calcicur-ral történő ideiglenes tömése elvégezhető a befejeződött és a még be nem fejeződött gyökérnövekedés esetén is.

Egyéb javaslatok:

Helytelen tárolás a paszta kiszáradását okozhatja.

A kalcium-hidroxid enyhén maró hatású, ezért kerülje a nyálkahártyával és kézzel történő érintkezést. Szembe ne kerüljön.

A nem kívánt érintkezés esetén alaposan öblítse le vízzel, és forduljon orvoshoz, ha szükséges.

A kemény fogszöveteknek azokat a részeit, amelyek részt

vesznek a tömések rögzítésében, ne kezelje kalcium-hidroxiddal.

Vastag rétegben, ha szuvas marad a dentin, végleges

tömőanyagként vagy ragasztóként ne alkalmazza a

Calcicurt.

Tárolás:

Használat után távolítsa el az applikációs kanült a fecskendőről, és tegye vissza a védőkupakot.

Ha a paszta megkeményedett, ne használja.

Tárolja szobahőmérsékleten (15 °C - 23 °C).

A szavatossági idő lejártá után ne használja fel a **Calcicurt**.

Készítményünket fogorvosi felhasználásra fejlesztettük ki.

Az általunk szállított termék információit legjobb tudásunk szerint, minden kötelezettség nélkül szóban és/vagy írásban

megadtuk. Az általunk adott információ és/vagy tanács nem

mentesíti Önt annak a megvizsgálásától, hogy az általunk

szállított anyag megfelel-e az Ön alkalmazási céljainak. Mivel

készítményünk alkalmazását nem tudjuk ellenőrizni, a

felhasználó felelős az alkalmazásért. Természetesen garantáljuk

készítményünk minőségét a fennálló szabványok

szerint megfelelően azon általános feltételeknek, melyeket az

értékesítés és a szállítás során kikötöttünk.