

Használati utasítás

Termék leírás:

A **CleanJoy** tisztító és polírozó paszta, amely professzionális fogtisztításhoz és polírozáshoz használható profilaktikus kezelések során. A fluorid-tartalmú paszta (700 ppm fluorid) három különböző tisztítási fokozatot kínál attól függően, hogy milyen mértékű a kontamináció, így minden páciens az adott helyzetnek megfelelő kezelésben részesülhet.

A tubusokon található színjelölés segíti a biztonságos alkalmazást és az egyszerű azonosítást az adott szintű tisztításhoz:

Piros = magas tisztító hatás

Sárga = közepes tisztító hatás

Zöld = polírozó paszta

Javallatok:

- Puha és kemény felületi lepedék eltávolítása.
- Külső eredetű elszíneződések (pl. festék, kávé, tea és dohány) eltávolítása.
- A fogfelszín polírozása professzionális fogtisztítás részeként, fogfehérítés előtt, vagy fogszabályozó eszközök eltávolítását követően.
- Fogpótlások tisztítása és polírozása professzionális fogtisztítás részeként.
- Ideiglenes ragasztó anyag maradványainak eltávolítása végleges beragasztás (cementezés) előtt.

Felhasználás:

- Vegye le a tubus kupakját és adagolja az anyagot egy keverőlapra. A **CleanJoy** minden kereskedelmi forgalomban kapható kehely formájú, vagy kis polírozó kefével alkalmazható. Használat után helyezze vissza a tubus kupakját.
- A hőtermelődézés vagy a paszta kifröccsenésének megelőzése érdekében a munka során a megfelelő fordulatszámot kell választani (2000 - 3000 rpm).
- A polírozó pasztával (zöld paszta) történő befelyező polírozás előtt, mindig használja a magasabb tisztító hatású (piros vagy sárga) pasztákat. A polírozó paszta intraorális homokfúvóval történő kezelést követően is használható.
- Az alkalmazás után vízzel alaposan öblítse le a megtisztított felületeket, elszívóval távolítsa el az anyag maradványokat, és kérje meg a páciens, hogy alaposan öblítse ki a száját.

Figyelmeztetések / óvintézkedések:

- A **CleanJoy** parabént és mentolt tartalmaz. A **CleanJoy** nem használható az ezen összetevők bármelyikével szembeni ismert hiperszenzitivitás (allergia) esetén.
- A szemmel való érintkezése esetén alaposan öblítse le vízzel, és forduljon orvoshoz.
- A túlzott fluorid bevitel hányingert okozhat. Ne nyelje le a **CleanJoy-t!**

Tárolás:

A **CleanJoy** fénytől védve, 4 ° C és 23 ° C közötti hőmérsékleten tárolandó. Ne használja fel a CleanJoy-t a lejárat napja után.

...