

VOCO

Bifluorid 10

Fluorid lakk túlérzékenység kezelésére Használati utasítás

A **Bifluorid 10** gyorsan száradó fogászati szuszpenzió, amely jól tapad a száraz zománcra és dentinre. Ezáltal elérhető a dentin tubulusok hosszabb ideig történő lezárása

A. **Bifluorid 10** vízhatlan védőréteget képez, amely szigetel a termikus és kémiai hatásokkal szemben.

Javallatok:

Minden hiperszenzitivitás (dentin-túlérzékenység) kezelése, beleértve a következőket:

- A nyaki terület és a koronai szélek hiperszenzitivitása
- Professzionális fogtisztítás és fogkőszedés utáni érzékenységre
- Túlérzékenység a fogfelszín preparálása és / vagy a csiszolás után
- Kopott okkluzális felszínek és olyan fogak túlérzékenységének kezelésére, melyeket kivehető pótlások kapcsai koptattak ki
- Túlérzékenység zománcsérüléseket szenvedett fogaknál (pl.: törések, kicsorbult fogak)
- Rebonding technikaként, a kavitás szélek restaurációk utáni zárására, különösen, ha savazásos technikát alkalmaztunk
- Dentin védelemre / alábélelésre amalgámtöméseknél

Felhasználása:

1.Preparáció

Tisztítsa meg és alaposan szárítsa meg a kezelni kívánt felszíneket.

2. Adagolás

a. Palack

Minden használat előtt rázza fel a **Bifluorid 10** üvegét. A szilárd részecskéknek jól kell diszpergálniuk. A palackban lévő hely és a két fém golyó megkönnyíti a homogén reszuszpendálást.

Adagoljon néhány csepp **Bifluorid 10**-et egy applikátorra vagy még előnyösebb, ha **Pele Tim** habzivacs pelletre. Használat után szorosan zárja vissza a **Bifluorid 10** palackját.

b. SingleDose (egy adagos) kiszerezés használatakor:

Válassza le a **SingleDose**-t a perforációnál és fordítsa a nyomtatott oldalával felfelé. Szűrje át a fóliát a **Micro Tim** ecsettel, tágítsa ki a rést körkörös mozdulatokkal és nedvesítse be az ecsetet

3. Alkalmazás

Vékony réteggel vonja be a felületeket. Figyelem: a túl vastag réteg könnyen visszahámlik. Hagyja a lakkot beszívódni 10 - 20 másodpercig, majd szárítsa meg levegővel. A **Bifluorid 10** helyes alkalmazás és megfelelő szájhigiénia mellett néhány napig megmarad a kezelt felületeken.

(A kezelést követő 12 - 24 órán belül nem szabad fogat mosni).

A túlérzékeny fognyaki területeken, a koronai széleknél, vagy hasonló indikációk esetén, ismételje meg a kezelést két-három alkalommal 7 napos időintervallumon belül. Ismételt alkalmazásnál csak szárítsa meg a felületeket és alkalmazza a lakkot.

További információk / óvintézkedések:

A **Bifluorid 10**: ethyl acetátot, nátrium fluoridot, kalcium fluoridot, cellulóz étert, és eugenolt tartalmaz.

Nem alkalmazható a bármely ezen összetevőkkel szembeni ismert allergia esetén.

1 g **Bifluorid 10** tartalmaz:

50 mg nátrium-fluoridot (megfelel 23 mg-fluoridnak) és 50 mg kalcium-fluoridot (megfelel 24 mg fluoridnak)

A **Bifluorid 10** csak rendkívül körültekintően használható olyan személyeknél, akik nem tudják kontrollálni a nyelési reflexet (pl. az iskolás kor előtti gyermekek és a fogyatékkal élők.)

A szisztémás fluorid kezelést (pl. fluorid tabletták vagy fluoridos konyhasó) abba kell hagyni néhány napig

a **Bifluorid 10** alkalmazását követően.

Nem megfelelő alkalmazás esetén (lásd a „Használati utasítást”) jelentősebb mennyiségű fluorid szájüregbe kerülését eredményezheti.

Lenyelve okozhat émelygést, hányást és / vagy hasmenést.

A teljes napi 2 mg fluorid adagot rendszeresen meghaladó bevitel (beleértve a szisztémás és helyi alkalmazást is) a fogfejlődés során megzavarhatja a zománc minerezációját.

Ilyen zavar a fluorózis is amely a fogzománcon megjelenő fehér foltokként mutatkozik meg.

A **Bifluorid 10** viszkozitásának elég alacsonynak kell lennie ahhoz, hogy a folyadék felrázás után könnyen ki tudjon cseppenni az adagolóból.

Adjunk hozzá néhány cseppet a hozzávaló **oldószerből** ha szükséges a készítmény hígítása. Az oldószer az eszközök, stb tisztítására is használható

Tárolás:

A **Bifluorid 10** közvetlen napsugárzástól védve,

szobahőmérsékleten (4 ° C - 23 ° C) tárolandó. Ne alkalmazza

a csomagoláson vagy az üvegen feltüntetett lejárati időn túl.

Készítményünket fogorvosi felhasználásra fejlesztettük ki. Az általunk szállított termék információit legjobb tudásunk szerint, minden kötelezettség

nélkül szóban és/vagy írásban megadtuk. Az általunk adott információ

és/vagy tanács nem mentesíti Önt annak a megvizsgálásától, hogy az általunk

szállított anyag megfelel-e az Ön alkalmazási céljainak. Mivel készítményünk

alkalmazását nem tudjuk ellenőrizni, a felhasználó felelős az

alkalmazásért. Természetesen garantáljuk készítményünk minőségét a fennálló

szabványok szerint megfelelően azon általános feltételeknek, melyeket az

értékesítés és a szállítás során kikötöttünk.