



Bevezetés: A BEYOND® Max5® Solution olyan páciensekre lett kifejlesztve, akiknél a fogérzékenység ismert probléma. A Max5® Solution egy 35%-os H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> tartalmú W Gel 1 dupla fecskendő tartalmaz, amelyet össze kell keverni az RS Gel 2-vel, amelyben érzékenység csökkentő összetevők, például kálium-nitrát és helyreállító összetevők, például hidroxilapatit található. Ezek a hidrogén-peroxid koncentrációját 6% alá csökkentik, így segítve az érzékenység csökkentését, valamint a fogzománc visszakeményedését. A végeredmény kiváló fehérség, minimális vagy semmilyen érzékenységgel. A LEGJOBB EREDMÉNYÉRT HASZNÁLJUK BEYOND® ACCELERATOR LÁMPÁVAL.

#### Tartalom:

- 5 db BEYOND® Max5® Solution W Gel 1 dupla fecskendő (2,6g/2,2mL)
- 5 csomag BEYOND® Max5® Solution RS Gel 2 (11g/9,5mL)
- 5 db spatula
- 5 db ecset
- 5 db arcvédő kendő
- 5 db útmutató az árnyalatokhoz
- 5 db keverőtégely

#### KEVERÉSI ÚTMUTATÁS:

1. A W Gel 1 fecskendő teljes tartalmát nyomjuk ki a keverőtálba. Az RS Gel 2 teljes tartalmát nyomjuk ki a keverőtálba.
2. A mellékelt spatulával kevergessük két percig, amíg el nem érünk egy egységes állagot.
3. Megkezdhető a kezelés a géllal.
4. A mellékelt ecsettel vigyük fel a gélt közvetlenül a fogzománcra.
5. Szívjuk le a fogzománcról a keveréket, majd vigyük fel újra. Ismételjük meg még kétszer a teljes kezeléshez.

#### ELŐKEZELÉS

1. lépés: Végezzünk egy előzetes fogászati vizsgálatot és beszéljünk meg a pácienssel, hogy milyen fehérséget szeretne, annak érdekében, hogy megtaláljuk a számára legjobb kezelési módszert.

## FEHÉRÍTŐ KEZELÉS

2. lépés: Vigyünk fel védőkrémet az ajkakra (nem része a csomagnak) és helyezzük be a BEYOND® FlexiBlue® szájtérpeszt. Határozzuk meg a fogak aktuális árnyalatát. (lásd az 1. és 2. ábrát)

3. lépés: Adjunk a páciensre védőszemüveget.

4. lépés: Helyezzünk vattatekerceket az alsó és felső ajkakfekek mindkét oldalára. Szükség esetén vigyünk fel még védőkrémet az ajkakra. (lásd a 3. ábrát)

5. lépés: Szárítsuk meg a fogakat és az ínyeket.

6. lépés: A mellékelt ecsettel vigyük fel a gélt közvetlenül a fogzománrcra. (lásd a 4. ábrát)

7. lépés: Helyezzük a BEYOND® Accelerator fogfehérítő lámpafejet 90°-os szögben a páciens fogaihoz és nyomjuk meg a Start gombot, hogy elkezdjük első 15 perces ciklust. (lásd az 5. ábrát)

8. lépés: A 15 perces ciklus végén használjunk száraz elszívást, hogy eltávolítsuk a fehérítő gélt. NE öblítsük le vízzel. Ismételjük meg az 5-7. lépéseket még kétszer a teljes, háromszor 15 perces kezelési ciklushoz.

Megjegyzés: bizonyos esetekben (súlyos vagy tetraciklin okozta elszíneződés) a kezelési idők kiterjeszthetők 20 percesre.

## UTÓKEZELÉS

9. lépés: Az utolsó ciklust követően távolítsuk el a gélt, a szájtérpeszt, a gézt és a védőszemüveget, majd kérjük meg a páciens, hogy öblítse ki a száját langyos vízzel.

10. lépés: Mutassuk meg a páciensnek a fogai új színét. (lásd a 6. szakaszt)

## FONTOS MEGJEGYZÉSEK

Várandós nőknek és 18 év alatti személyeknek nem javasolt a kezelés elvégzése.

Hagyjuk abba a fehérítő kezelést, ha a páciens súlyos fogérzékenységet jelez és azonnal távolítsuk el a fehérítő gélt.

## Ellenjavallatok

BEYOND® Max5® Solution fehérítő gél nem javasolt olyan páciensek esetében, akiknél ismert allergia vagy kémiai érzékenység áll fenn peroxidokra vagy glikolokra.



**beyond® International Inc.**  
— Global leaders in aesthetic dental products.

### BEYOND USA HEADQUARTERS

12503 Exchange Dr. Suite 530  
Stafford, TX 77477 USA

Tel: +1-281-277-4352

Fax: +1-281-277-4350

E-mail: info@beyonddent.com

### BEYOND EUROPEAN HEADQUARTERS

Melkerstr. 4  
14167 Berlin, Germany  
Tel: +49-304-908-49-57

E-mail: europe@beyonddent.com

### BEYOND ASIA PACIFIC HEADQUARTERS

Beijing, China 100029  
E-mail: asia@beyonddent.com

[www.beyonddent.com](http://www.beyonddent.com)



**FELELŐS SZEMÉLY**  
MDSS GmbH

Schiffgraben 41

30175 Hannover Germany

Gyártja:

**BEYOND® INTERNATIONAL INC.**

12503 Exchange Dr. Suite 530

Stafford, TX 77477 USA

Kérdése van? Tel.: +1-866-695-6452 H-P 9:00 a.m.  
– 5:30 p.m. CST