

EGYETLEN TECHNOLÓGIA – PONT AMIRE SZÜKSÉGE VAN

A Kerr levédett GPDM monomeréből és az újítoán három oldószerből álló összetétel hatékonyan marja a zománcot, miközben elősegíti a dentin alapozását és tömítését. Mindezek egy megbízhatóbb és kevésbé érzékeny technikát eredményeznek.



GPDM
Monomer

A RAGASZTÓANYAGOK ETALONJA

A klinikailag már bizonyított OptiBond GPDM monomer más ragasztómonomerekhez képest hatékonyabb és megbízhatóbb ragasztást biztosít mind a fogszerkezetekhez, mind a kompozit anyagokhoz. Amíg a monomer savas foszfátcsoportja a fog hidrofil felszíneire való hatékony tapadásról gondoskodik, addig a GPDM monomer metakrilát funkció csoportjai, más monomerekhez (MDP) képest hatékonyabb közties anyagot hoznak létre a hidrofób kompozitokon, mivel az OptiBond GPDM monomere több metakrilát funkció csoportot tartalmaz. Ez mindkét szubsztátumhoz jobb kompatibilitást, így magasabb kötőerőt eredményez.



Három
oldószer-
rendszer

HÁROM OLDÓSZER EGYBEN

A megbízhatóság növelése és az érzékenység csökkentése érdekében az OptiBond Universal összetételét a Kerr saját hármass oldószerrendszere is gazdagabbá teszi:

- A **VÍZ** jobb maratást és nedvesítést tesz lehetővé, és elősegíti a ragasztóanyag behatolását a dentincsatornákba.
- Az **ACETON** stabilabban megtartja a formulát a lejárató időig, ugyanakkor a gyors párolgása miatt az alkalmazás közben növeli a savasságot és jobb maratást tesz lehetővé.
- Az **ETANOL** elősegíti a homogén ragasztóréteg kialakulását, így az applikáció során az anyag kevésbé technika-érzékeny.

MARADJUNK KAPCSOLATBAN

Sokoldalú termékek, sokoldalú kommunikáció. Sokféleképpen lehet tartani a kapcsolatot a Kerr Dentallal, és sokféle információ érhető el a legújabb híreinkről és fejlesztéseinkről.



Lépjen velünk kapcsolatba

A közösségi médiákon



Megkaphatja az új híreket

Ha feliratkozik a hírlevelünkre



Beszéljen velünk

A helyi képviselőinken keresztül



Fedezze fel az újdonságainkat

Ha ellátogat a webhelyünkre



Az OptiBond™ és az OptiBond™ Universal a Kerr Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban. Minden egyéb védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdona.

További információért kérjük látogasson el weboldalunkra
www.kerrdental.com



OptiBond Universal - készletek

Ref./alkatrészszám	Leírás
36517	OptiBond Universal – flakonos készlet – 5 ml 5 ml flakonos készlet OptiBond Universal, 100 Applikátor, 3g Savazó gél fecskendő, 10 Savazócsúcs, 25 Keverőtálca, technikai útmutató kártya, Használati útmutató
36518	OptiBond Universal – unidose készlet – 100 db 100 x 0,18 ml unidose patron, 100 Applikátor, 1 Savazó gél fecskendő (3g), 3g Savazó gél fecskendő, 20 Savazócsúcs, 25 Keverőtálca, technikai útmutató kártya, Használati útmutató

OptiBond Universal - Utántöltők

Ref./alkatrészszám	Leírás
36519	OptiBond Universal – 5 ml-es utántöltő
31297	Savazó gél – 3 db 3 g-os fecskendő
26909	Savazócsúcs utántöltők

KerrHawe SA | Via Strece, 4 | 6934 Bioggio | Switzerland
Phone +41 91 610 05 05 | Fax +41 91 610 05 14 | info@kerrdental.eu
www.kerrdental.com

Kerr
RESTORATIVES

Az egyszerű megoldás amelyben megbízhat



OptiBond™ Universal

Egykomponensű univerzális ragasztó

EGY LÉPÉS, EGY MÁRKA, BÁRMILYEN ELJÁRÁSHOZ

Megérkezett az OptoBond™ Universal. Az egyflakonos ragasztóanyag egyesítette a szabadalmaztatott GPDM technológia megbízhatóságát az egyszerűen használható univerzális megoldással. Megbízható ragasztóerő minden típusú felszínhez, bármely savazásos technikával.

Hatóerő és flexibilis alkalmazás végre egy anyagban

EGYSZERŰSÉG KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL.

Az OptiBond Universal célja, hogy mindenhol leegyszerűsítse az alkalmazott gyakorlatokat, miközben megbízható támogatást nyújt a fogorvosoknak a minőségi eredmények elérésében.

Az egyflakonos összetétel alapján az OptiBond klinikai sikertörténete képezi, így módon egyszerű szilárdságot, mikroszivárgások elleni védelmet és teljes sokoldalúságot biztosít.



BIZONYÍTOTT SZILÁRDSÁG.

Az OptiBond GPDM monomert és a Kerr innovatív hármas oldószerrendszerét kombináló saját technológia mind a zománcra, mind a dentinen megbízható ragasztási teljesítményt nyújt.



VÉDELEM A POSZTOPERATÍV ÉRZÉKENYSÉG ELLEN.

Az OptiBond Universal hidrofil tulajdonságai gondoskodnak róla, hogy az anyag mélyen behatoljon a dentinacsatornába, így egyszerre védi a fogat a mikroszivárgások ellen és biztosít jobb védelmet a posztoperatív érzékenység ellen.



TELJES SOKOLDALÚSÁG.

Az OptiBond Universal lehetőséget ad, hogy olyan, már bizonyított összetételű anyaggal dolgozzon, amely szubsztrátumoktól és technikáktól függetlenül mindig hatékonyan működik, a teljes savazástól az önsavazáson keresztül a szelektív savazásig.



EGY FLAKON, EGY RÉTEG.

Az OptiBond Universal szépsége az egyszerűségéből fakad. A modern összetétel az alapozót, ragasztót és maratóanyagot egyetlen flakonban kombinálja, és egyetlen bevonat formájában is hatékony.



MÉLY CSALÁDI KÖTELEKEK.

A több mint 20 évnyi klinikai sikert maga mögött tudó OptiBond márkanév mára a ragasztás, megbízható teljesítmény és ügyfélorientált megoldások etalonjává vált.

BIZONYÍTOTT TELJESÍTMÉNY.



A fogszerkezet helyreállításához különféle adottságokkal rendelkező és kihívásokat teremtő anyagok szükségesek. Az OptiBond Universal ezeket a bonyolult tényezőket megbízható klinikai teljesítménnyel kezeli.

Az oldat erősebben köt a különböző anyagokhoz, és jobb hatékonysággal hatol be a dentinacsatornába és maratja a zománcot.




RAGASZTÁSI ERŐ A ZOMÁNCON ÉS A DENTINEN

Az OptiBond Universal mind a dentinen, mind a zománcra hatékony ragasztóerőt biztosít. Maximális szabadságot ad a felhasználónak, mert bármely savazási technikánál egyszerű eredményt biztosít.

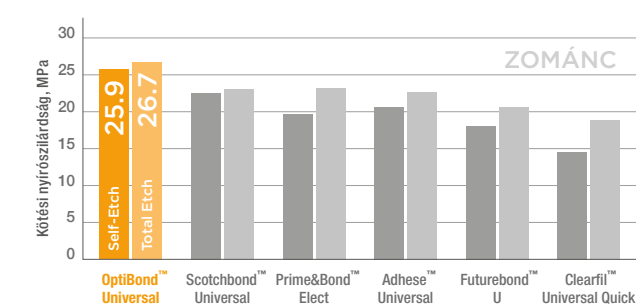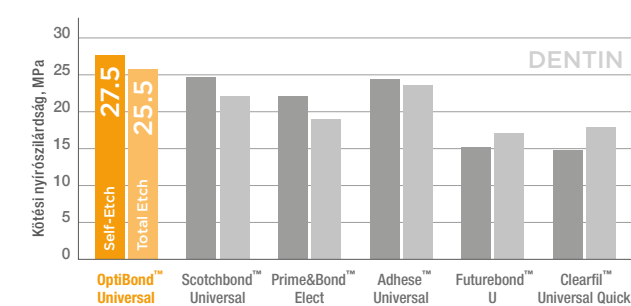

VÁGATLAN ZOMÁNC MARATÁSA

Az egyedi nanomaratási képesség mélyebben maratott felületet biztosít a jobb mechanikai tartás érdekében.

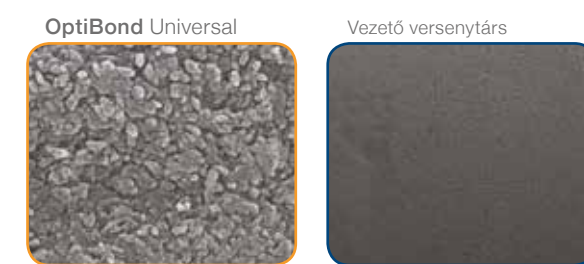


Mikroszkopikus nézet, 50.000x



BEHATOL A DENTINCSATORÁKBA

A dentinacsatornába történő mély penetráció jobb védelmet nyújt a posztoperatív érzékenység ellen, és jobb ragasztóerőt biztosít.

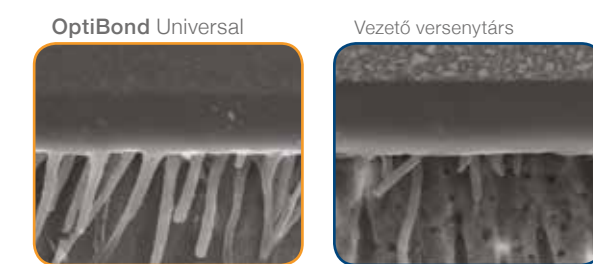


Mikroszkopikus nézet, 2.000x



RAGASZTÁSI ERŐ KÜLÖNFÉLE SZUBSZTRÁTUMOKON

Az OptiBond™ Universal és az NX3™ univerzális ragasztó cement kombinációja különféle szubsztrátumokon anélkül is kiemelkedő ragasztóerőt hoz létre, hogy külön kerámia- vagy fémalapozóra (primer) lenne szükség

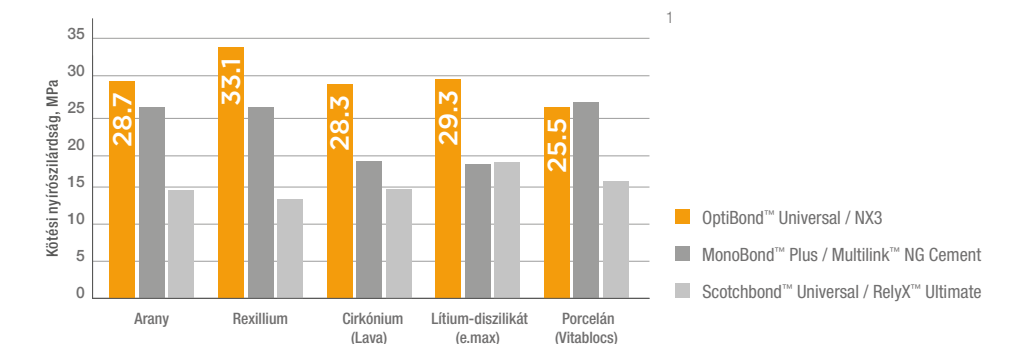

RAGASZTÁSI ERŐ CEMENTTEL

Az OptiBond Universal és az NX3 együttes használata jobb ragasztási kompatibilitást tesz lehetővé, és magas indirekt kötőerőt biztosít a dentinhez.

