

VOCO

Traypurol tabletták

Használati utasítás

Vízben oldódó tabletták lenyomatkanalak és eszközök tisztítására.

A Traypurol maradéktalanul eltávolítja az alginátokat, cink-oxid eugenolt, karboxilát és a foszfát cementet a lenyomatkanalokról és az eszközökről, ultrahangos tisztítókád segítségével nélkül is. A Traypurol biológiailag lebomló tisztító anyag

A használat módja:

Egy Traypurol tablettá segítségével egy liter tisztító oldatot készíthetünk. Távolítsa el a tablettá csomagolását és tegye a tisztító tartályban, és töltsse fel meleg, vagy hideg vízzel. A meleg víz felgyorsítja a tisztítási folyamatot. Kerüljük a bőrfelülettel való érintkezését.

Helyezze a lenyomatkanalakat és az eszközöket a tablettá teljes feloldódása után az oldatba, miután a nagyobb szennyeződésektől már megtisztította azokat. A lenyomatkanalakat felfelé fordítva helyezze az oldatba, ez segíti a tisztítási folyamatot. Hagyjuk a lenyomatkanalakat és az eszközöket a tisztító oldatban ázni legalább 2 órán át, de 72 óránál semmiképpen sem tovább. Végül vegye ki, és öblítse le tiszta vízzel az eszközöket.

Traypurol tabletták alkalmasak minden rozsdamentes fém és műanyag felület megtisztítására.

Az oldatot elegendő 2 - 3 naponként cserélni.

Traypurol tabletták használhatóak ultrahangos tisztítókádban, de mosogatógépben NEM! Tartalmaz, komplexképző reagenst > 30%, nem ionos tenzideket <5%, korróziós inhibitorokat.

Tárolása: száraz helyen, 4 ° C - 23 ° C közötti hőmérsékleten.

Figyelmeztetés:

Irritálja / izgatja a szemet.

Biztonsági tanácsok:

Ha a szembe kerül, azonnal mossa ki bő vízzel és forduljon orvoshoz. Ha lenyelte, azonnal forduljon orvoshoz.

Készítményünket fogorvosi felhasználásra fejlesztettük ki. Az általunk szállított termék információit legjobb tudásunk szerint, minden kötelezettség nélkül szóban és/vagy írásban megadtuk. Az általunk adott információ és/vagy tanács nem mentesíti Önt annak a megvizsgálásától, hogy az általunk szállított anyag megfelel-e az Ön alkalmazási céljainak. Mivel készítményünk alkalmazását nem tudjuk ellenőrizni, a felhasználó felelős az alkalmazásért. Természetesen garantáljuk készítményünk minőségét a fennálló szabványok szerint megfelelően azon általános feltételeknek, melyeket az értékesítés és a szállítás során kikötöttünk.